

РЕАКТИВЫ КОМПАНИИ РЕНАМ

1. АГРЕНАМ. ТН ВЭД 3002109509

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для исследования агрегационной активности тромбоцитов.

Состав набора реагента

АДФ, лиофильно высушенный с концентрацией 0,2 мМ/л – 2 флакона;

Коллаген, лиофильно высушенный с концентрацией 0,2% – 2 флакона;

Ристоцетин, лиофильно высушенный с концентрацией 1,5% – 2 флакона.

2. Реаклот-гепарин ТН ВЭД 3002109509 - *hyzndphym*

0%

Набор реагентов для определения анти Ха активности гепарина коагулологическим методом.

Набор предназначен для мониторинга за введением гепарина (в том числе и низкомолекулярного), путем определения его анти Ха активности в плазме.

Метод основан на способности небольших количеств гепарина исследуемой плазмы в присутствии антитромбина III (АТIII) нейтрализовать экзогенный активированный фактор Ха.

Состав набора.

Субстратная плазма, лиофильно высушенная (2мл) – 2 фл.

Реагент 1 - смесь фактора Ха и фосфолипидов, лиофильно высушенная (2мл)–2 фл.

Хлорида кальция 0.035М (5мл) – 1 фл.

3. ВА-ТЕСТ ТН ВЭД. 3002109509 - *hyzndphym*

0%

Набор реагентов для определения волчаночного антикоагулянта (ВА-тест)

Состав набора:

АЧТВс (4мл) – 2 флакона;

АЧТВп (2мл) – 2 флакона;

ПВс (1мл) - 1 флакон;

ПВп (4мл) - 1 флакон;

ВАС (2мл) – 2 флакона;

ВАп (1мл) – 2 флакона.

Плазма контрольная, содержащая ВА – 1 флакон

Дополнительные реагенты: Кальция хлорида 0,025М раствор (5мл)

1. **АЧТВс-реагент** - представляет собой лиофильно высушенный реагент на основе фосфолипидов и активатора – эллаговойкислоты.

2. **ПВс-реагент** представляет собой лиофильно высушенный экстракт из мозга кролика в буфере со стабилизаторами.

3. **ВАС-реагент** представляет собой лиофильно высушенную смесь яда гадюки Рассела и фосфолипидов.

4. **АЧТВп-реагент** - представляет собой лиофильно высушенный реагент на основе избытка фосфолипидов и активатора – эллаговой кислоты.

5. **ПВп-реагент** представляет собой лиофильно высушенный тромбопластин-кальциевый реагент экстракт из мозга кролика в буфере со стабилизаторами.

6. **ВАп-реагент** представляет собой лиофильно высушенную смесь яда гадюки Рассела и избытка фосфолипидов.

4.АЧТВ ТН ВЭД 3822000000 - 128000000
18%

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ-тест)

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Состав набора

АЧТВ-реагент, лиофильно высушенный (4 мл) – 7 флаконов.

Кальция хлорида 0,025 М раствор (10 мл) - 3 флакона.

5. **РЕНАМПЛАСТИН** ТН ВЭД 3822000000 *— биогенный —*

18%

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Тромбопластина (из головного мозга кролика) для определения протромбинового времени (Ренампластина)

НАЗНАЧЕНИЕ

Ренампластин - тромбопластин-кальциевый реагент, водорастворимый, полученный из мозга кроликов с добавлением оптимального количества ионов кальция.

6. **Реаклот-АТIII – тест** ТН ВЭД 3002109509 *— биогенный —*

0%

Набор реагентов для определения активности антитромбина III в плазме крови человека по U. Abildgaard.

Состав набора код ПФА-2/1

1. Тромбин, лиофилизированный (4 мл) - 2 флакона,
2. Фибриноген, лиофилизированный (2 мл) - 4 флакона,
3. Дефибринированная плазма - калибратор, лиофилизированная, (1 мл) - 1 флакон,
4. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) - 1 флакон.

7. **ПЛАЗМА КОНТРОЛЬНАЯ** ТН ВЭД 3002109500 *— биогенный —*

0%

Реагент для контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем

Плазма контрольная

Состав набора

Плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы - 3 флакона

Плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза - 3 флакона

Плазма контрольная пулированная, собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, стабилизирована НЕРЕС- цитратным буфером и лиофильно высушена.

Флаконы силиконированы для предотвращения контактной активации.

8. **КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ** ТН ВЭД 3822000000 *— биогенный —*

18%

ИНСТРУКЦИЯ

Парус-тест™ поставляется в комплектации

Состав набора

- 2 флакона *Си-активина*TM (активатора протеина С) 2X1,0 мл;
- 4 флакона *АПТВ-реагента*, состоящего из смеси фосфолипидов и эллаговой кислоты (4X2,0 мл);
- 2 флакона стандарт-плазмы (2X1,0 мл);
- 1 флакон концентрированного (20:1; 0,5M) раствора хлорида кальция (1X2,0 мл).

— **d-димер тест компании Roche** ТН ВЭД
10005022/161015/0057285/1 — *7578*

Состав набора:

1x1.3 мл, флакон реагента (1 латекс). Готовая к использованию суспензия латексных частиц, покрытых моноклональными мышиными антителами, к Д-димеру человека.

1x20 мл, флакон реагента 2 (буфер). Буферный набор . 20 мл глицинового буфера .

1x1 мл, флакон реагента 3 (отрицательная контрольная плазма , человека, лиофил.)

1x1мл, флакон реагента 4 (положительная контрольная плазма, человека, лиофил.)

1 полиэтиленовая упаковка с 10 картами

Палочки для перемешивания

РЕАКТИВЫ КОМПАНИИ МЕДИОЛАБ

— **МЕДИФИБРИНОГЕН** ТН ВЭД 3822000000

medifibrinogen
1875

Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека

Принцип метода.

Определение содержания фибриногена основано на измерении времени свертывания разведенной плазмы избытком тромбина.

Состав набора.

1. Медифибриноген, стабильный лиофилизированный бычий тромбин для определения фибриногена (4 мл) - 5 флаконов,
2. Плазма-калибратор фибриноген (1мл) - 1 флакон,
3. Буфер имидазоловый концентрированный (5 мл) - 1 флакон.

РЕАКТИВЫ КОМПАНИИ БИОХИММАК

ORGENTEC Diagnostika

1. Анти-аннексин V IgG/IgM ТН ВЭД 3002 10 990 0

Определение антител к аннексину V (IgG/IgM) основанной на ИФА-анализе.

Тест-система рассчитана для количественного определения IgG/IgM антител против аннексина V в сыворотке или плазме человека.

Состав:

микропланшеты		
калибратор		A
калибратор В		
калибратор С		
калибратор D		
калибратор E		
калибратор F		
Контроль положительный IgG		(+)
Контроль положительный IgM		(+)
отрицательный	контроль	(-)
Буфера		разбавитель
Ферментный	конъюгат	G
Ферментный		конъюгат M
TMBC субстрат		
Стоп-раствор		
Промывочный		буфер

2. Анти-бета-2-гликопротеин I (IgG/IgM) ТН ВЭД 3002 10 990 0

Определение антител к Анти-бета-2-гликопротеин I (IgG/IgM), основанной для количественного измерения антител (класса IgG/IgM) к бета-2-гликопротеин I в сыворотке или плазме человека.

микропланшеты			
калибратор			
калибраторВ			А
калибраторС			
калибраторD			
калибраторЕ			
калибраторF			
КонтрольположительныйIgG			(+)
КонтрольположительныйIgM			(+)
отрицательный			(-)
Буфера	контроль		
Ферментный		разбавитель	
Ферментный	конъюгат		G
TMBCубстрат		конъюгатM	
Стоп-раствор			
Промывочный			буфер

3. Анти-ПротромбинIgG/IgM ТН ВЭД 3002 10 990 0

Определение антител к протромбину (IgG/IgM), основанной для количественного измерения антител (класса IgG/IgM) к протромбину в сыворотке или плазме человека.

микропланшеты			
калибратор			
калибраторВ			А
калибраторС			
калибраторD			
калибраторЕ			
калибраторF			
КонтрольположительныйIgG			(+)
КонтрольположительныйIgM			(+)
отрицательный			(-)
Буфера	контроль		
Ферментный		разбавитель	
Ферментный	конъюгат		G
TMBCубстрат		конъюгатM	
Стоп-раствор			
Промывочный			буфер

4. Axis® Гомоцистеин для иммуноферментного анализа. Предназначен для количественного определения общего гомоцистеина в плазме или сыворотке FHCY100 TH ВЭД 3002109900

Реагент А

Аналитический буфер

Фосфатный буфер, 0,09% NaN₃ (54 мл)

Реактив В

Аденоз

Аденозин/дитиотреитола, лимонная кислота (3,5мл)

Реагент С

Бычий S-аденозил-L-гомоцистеингидролазы, гидролазы трис-буфер ж /глицерин, метилпарабен. (3,5мл)

Реагент D

ферментативный ингибитор

0,15% фосфатный буфер (55мл)

Реагент Е аденозин
деаминазная

Аденозиндеаминазы, фосфатный буфер,
0,09% NaN₃, фенол-красный краситель (55мл)

Реагент

Мышиные моноклональные антитела
α-SA Антитела против S-аденозил-L-Homocysteine-антитело 0,01% (25мл)

Реагент G

Ферментный конъюгат

Анти-мышь-антитело, конъюгат фермента,
пероксидаза хрена, синий краситель (15мл)

Реагент H тетраметилбензидин (15мл)
раствор субстрата

РеагентS	0,8Мсерной кислоты(20мл)
Стоп-раствор	
Промывочный буфер	Фосфатный буфер, 0,01% мертиолят (60мл)
Калибраторы	S-аденозил-L-гомоцистеина. 2-4-8-15-30-50мкмоль / лвбуфере (6x1.5мл)
Микротитровальныеполосы	ПокрытыеBSAS-аденозил-L-гомоцистеина(12x8)
Контроли	Разведенныеобразцы сывороткичеловеческого Буфер, 0,09% NaN ₃ . Низкий, средний и высокий уровень (3x1ю5мл)
Промывочный буфер	Фосфатный буфер, 0,01% Мертиолят (1000мл)

TECHNOZYM®ADAMTS-13 ингибитор 5450401 ТН ВЭД 3002109900

СОСТАВ

тестовыеполоски

1.ELISA(12), с 8 лунок каждый, покрытыхрекомбинантной формыADAMTS13протеазы;
Осушительпоставляетсяв алюминиевую оболочку.

2. Промывочный буферконцентрат(PBS, pH 7,3); содержащиймоющее средство;
0,01%Мертиолят; 1 флакон,80мл.

3. Инкубационный буфер (= разбавление пробы буфер) (PBS, pH 7,3); содержит стабилизатор белка; 0,05% проклин; краситель, 1 флакон, 90 мл, готов к использованию.

4. Калибраторы (стандарты), пронумерованные от 1 до 5; лиофилизированные; 1 флакон каждая; 0,5 мл.

1. Положительные и отрицательные плазмы контроль; лиофилизировали; 1 флакон каждая; 0,5 мл.

2. Конъюгат: анти-человеческий IgG; голубого цвета; 1 флакон, 0,3 мл.

7. Хромогенный субстрат ТМВ (тетраметилбензидином); 1 ампула; 12 мл; готов использовать.

8. Стоп - раствор серной кислоты 0,45 моль / л; 1 флакон; 12 мл; готов к использованию.

9. Клеевая пленка: для тест-полосок ELISA; 2 куска.

ORGENTEC Diagnostika

Антифосфолипидные антитела IgG/IgM ТН ВЭД 3002 10 990 0

Определение антител к фосфолипидам (IgG/IgM), основанной для количественного измерения антител (класса IgG/IgM) к фосфолипидам в сыворотке или плазме человека.

микропланшеты

калибратор А

калибратор В

калибратор С

калибратор D

калибратор Е

калибратор F

Контроль положительный IgG (+)

Контроль положительный IgM (+)

отрицательный контроль (-)

Буфера разбавитель

Ферментный конъюгат G

Ферментный конъюгат M

TMBC субстрат

Стоп-раствор

Промывочный буфер